

台式磁力瘦说明书



用户在操作本产品时，请先仔细阅读本仪器说明书

目 录

1. 注意事项	2
操作禁忌事项	3
1.1 安全注意事项	3
1.2 操作注意事项	3
2. 仪器安装	4
2.1 组成部分	5
3. 仪器界面操作流程	7
3.1 开始界面	8
4. 保养和维修	10
5. 常见的故障排除方法	10
6. 制造商的责任	11
7. 贮存及运输管理	11
8. 保修条款	11
9. 技术参数	11
10. 配件清单	12

1. 注意事项

1、仪器打开之后根据仪器配置清单检查配件是否齐全，如有问题请与销售商联系。

1.1 操作禁忌事项

- 1、孕妇、哺乳期女性、月经期女性禁做。
- 2、接近月经期女性慎做，可能会导致月经提前或腹部痉挛。
- 3、有金属或电子设备植入（心脏起搏器、除颤器、神经刺激器、药物泵等）部位禁做。
- 4、恶性肿瘤、癌症等重大疾病患者禁做。
- 5、心脏疾病、心律不齐、癫痫症、严重高血压、糖尿病患者禁做。
- 6、体内有人工填充物区域禁做。
- 7、重大手术患者禁做，也可根据恢复情况，咨询医生意见后判断使用。
- 8、皮肤有伤口者，避开伤口或不做。
- 9、饱腹时不能操作腹部，至少饭后一个小时方可操作。
- 10、使用时尽量避开肋骨。
- 11、使用前，必须要将身上佩戴的金属物件取下，使用时，要避开衣服上的金属物件。
- 12、脂肪层过厚的人群不建议使用此仪器，此仪器主要针对肌肉组织进行训练，而脂肪层太厚的人群，能量难以达到肌肉层使肌肉收缩，影响效果，建议溶脂后再做。

1.2 安全注意事项


- 1、电源插头弄脏时请及时擦干净，并确认没有异物后方可连接插座。
- 2、接入 220-230V，50Hz 的三插大功率电源插座，移动设备时必须拔掉电源线。
- 3、插电后不要随意触摸电源插头，不要用力拉扯电源线。
- 4、请勿用潮湿的手触摸电源线及电源插头。
- 5、不要用力冲击仪器或者电源周围部位。
- 6、不要在高温下使用仪器，仪器附近不要放取暖设备。
- 7、仪器启动后不要随意拆开仪器电源插座，会引起故障。
- 8、仪器使用时若出现冒烟或异味请拔掉电源，咨询售后服务。
- 9、手柄启动时不能触碰嘴唇、眼睛，以免引起受伤。

1.2 操作注意事项

- 1、请认真阅读使用说明书，再根据说明书里的方法使用，长时间不用仪器时，请拔掉电源。
- 2、使用前必须跟专家咨询或者经过专业培训后使用仪器。
- 3、使用手具时，先把强度调低，再逐渐调到适用的强度。
- 4、手柄不用时要放在配件架，防摔；手柄在配件架时不要用力随意拉连接线。
- 5、每次使用完毕后，需要待机十分钟再关闭电源。若需换人操作，请 5 分钟后再使用，同一个操作手具，每次使用后，需等待 5 分钟才能再次使用。
- 6、如果使用仪器时患者身上出现异常情况时，请立即停止操作，然后咨询专家。
- 7、仪器有异常时，请再次确认说明书后操作；如果异常未解除，不要自己拆开仪器，应当联系售后服务咨询。


2. 仪器安装

2.1 组成部分

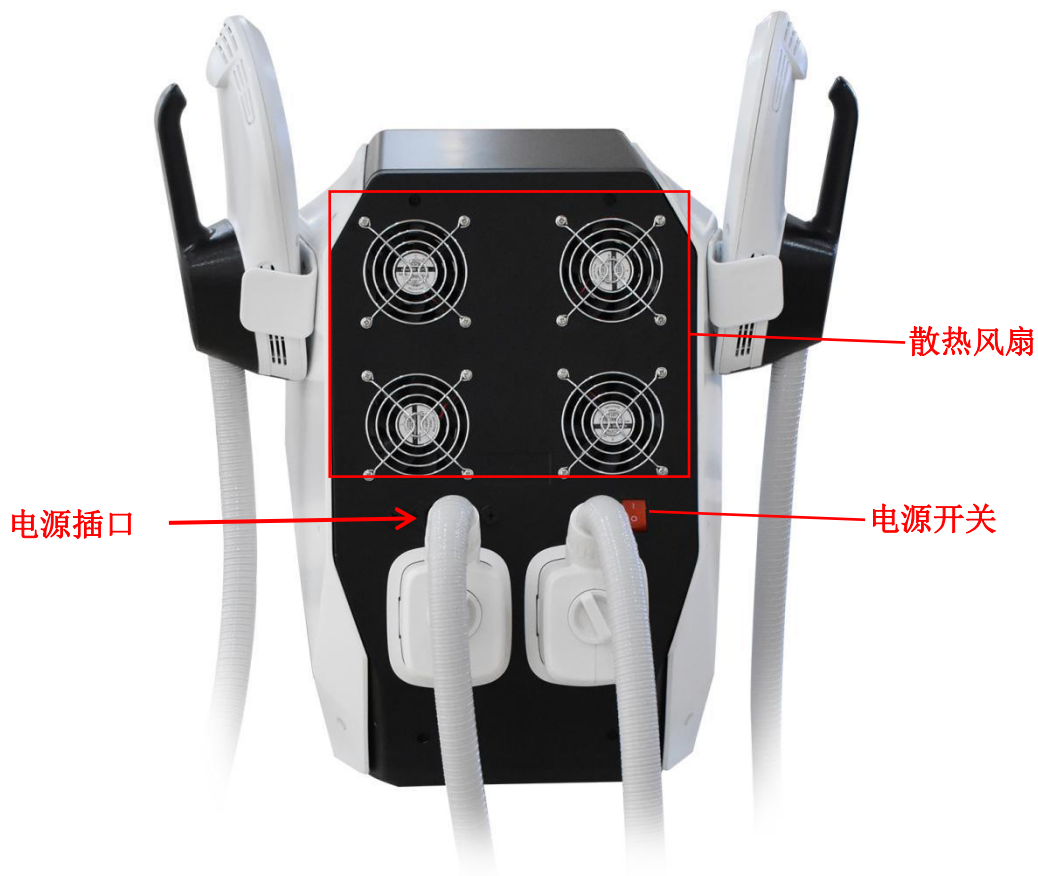

3. 仪器界面的操作流程

3.1 开始界面

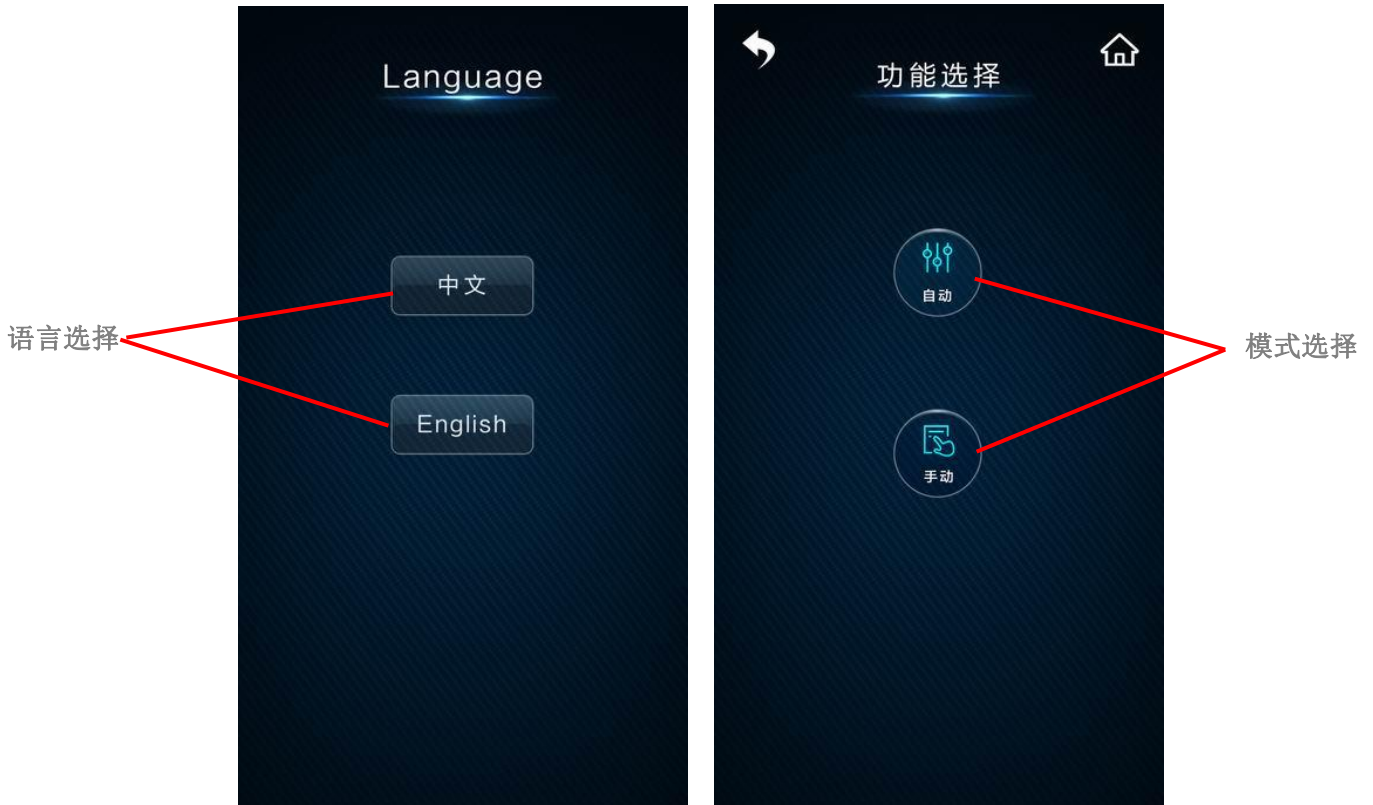

注：1. 自动模式操作界面如下





2、可独立选择 AB 手柄，根据不同客户调节手柄强度/时间，点击开始/停止按钮进行操作



手动模式操作界面如下



- 注意：1 选择需要操作的部位：
2 调节好强度/频率时间：
3 手柄对准操作部位绑贴好，再按下屏幕上的开始工作按钮开始操作
4. 使用完后及时清理手柄，并把手柄轻放置在手柄架上

4. 保养和维修

4.1 保养

4.1.1 日常检查

管理人员必须定期对仪器和部件进行检管。

请检查仪器使用前电源线是否有破损，有破损时停止使用仪器，

4.1.2 清洁

定期进行仪器清洁以确保设备的卫生和良好的运作。可以在仪器断电的情况下用湿布擦拭设备外壳，使用肥皂水或中性清洁剂。

4.1.3 保险丝的更换

更换保险丝时，为防止触电，请务必关闭电源，拔掉电源插头

4.2 维修

购买仪器后需要保存好保修卡，需要维修时跟仪器一起寄给生产商或代理商，才具有保修效力：自购机开始在非人为质量问题，主机免费保修壹年（注：凭购机票据和保修卡保修：此处的保修范围仅限于就仪器主机，不包括配件等需定期更换的易耗品）超过保修期限之后，请与生产商直接联系提供有售售后服务。维修本机须 与本公司业务部或经销商联系，切勿擅自修理。凡未经同意自行拆封，本公司不予保修。

5. 常见的故障排除方法

故障现象	产生的原因	排除和解决方法
设备不工作	电源插头未插入插座 电源开关没开 电源保险丝故障	检查电源 检查电源开关 更换保险丝
手柄不工作	工作头已经损坏 仪器背后接口未正确安装	更换工作头 重新安装

6. 制造商的责任

- 生产的产品应符合产品标准，如有不符合的，本公司负责更换、退货。
- 因产品制造缺陷造成人身、财产损害的，本公司承担相应的责任，但有下列情况，本公司不承担责任：
- 购买者、操作使用者不按照说明书操作规范使用，不按照安全注意事项、警示性说明使用的。
- 违反产品运输、安装、使用、维修、贮存等规定造成产品、人身、财产损害的。

本公司对产品实行终生维护及技术服务，在规定质量保证期内发生的制造质量问题，将免费为用户维修

- 配件需更换时必须从本公司购买原装配件，否则由此产生不良后果由用户自行承担

7. 贮存及运输管理

贮存：仪器贮存时应放在原包装箱内，置于通风良好的室内，包装箱应垫高，环境温度为-10℃~40℃，相对湿度不大于 93%，不允许放置在有害气体，易燃、易爆物质及腐蚀性气体的周围。

运输：在包装条件下的仪器适合于公路、铁路、航空及水路运输，在装卸和运输过程中应防止剧烈振动和冲击，且不能受潮，不能与易燃、易腐蚀的物质混装、混运，具体要求按订货合同规定

8. 保修条款

本仪器的保修期限为 1 年（注意：人为损坏除外）

配件保修期限为 3 个月（注意：人为损坏除外）。

超出使用期的仪器如继续使用需经过工程师检测批准，并在后续使用中需定时由工程师对仪器进行性能检测超过使用期限的报废仪器和配件应根据当地的相关规定处理。

维修记录表			
产品名称		购买日期	
经销店名称		电话	
经销店地址			
顾客名称		电话	
顾客地址			
维修日期	故障原因	维修内容	

9. 技术参数

项目	参数
手柄配置	2 手柄（风冷）
电磁波能量	0-5T
屏幕尺寸	12 寸
脉冲	300us（微秒）
电力	220VAC, 10A, 50Hz
机箱尺寸	47*35.5*50cm
航空箱尺寸	57.5*47.5*74(cm)
重量	17KG

10. 配件清单

序号	配件	数量	单位
1	主机（合格品）	1	台
2	电源线	1	条
3	操作手柄	2	个
4	绑带（长）	1	条
5	绑带（短）	2	条
6	产品保修卡	1	张
7	产品使用说明书	1	份