

# Slim Beauty



# 用戶手冊

# 內容

---

1. 一般警告	••••• 3
2. 結構和配件	••••• 4
3. 用戶界面	••••• 5
4. 如何操作	••••• 7
5. 如何使用	••••• 8
6. 注意事項	••••• 13
7. 規格	••••• 16
8. 保修	••••• 17



- 使用前請務必正確閱讀說明書及使用守則。
- 閱讀使用守則並將其保存在用戶可以隨時查看的位置





### 不可使用

- 正在使用人體移植電子醫療設備的人
- 曾進行腦部手術或大腦有過度損傷的患者
- 孕婦



### 警告

- 切勿在頸動脈上或附近使用
- 切勿刺激心臟
- 切勿於該區使用金屬植入物或附加金屬假體



### 注意

以下人士使用設備前，請先諮詢醫生

- 患有心血管疾病的人
- 進行過手術或正在康復的人
- 對外部刺激敏感的人
- 任何患有個人疾病的人



## 2

## 结构和配件



注：注水时，溢水口要插入通风管（排水管），加满水后，拔出注水管与通风管后再工作。

<b>1</b>	显示屏	<b>2</b>	治疗手柄
<b>3</b>	手柄支架	<b>4</b>	散热风扇
<b>5</b>	注水口	<b>6</b>	溢水口
<b>7</b>	排水口	<b>8</b>	电源开关



- 请确保在使用前完整组装组件。
- 实际组件的形状可能与上图不同。



## 3 用戶界面

### 屏幕配置

磁力瘦屏幕由四個主要部分組成



1	狀態指標	顯示磁力瘦當前的內部溫度和水位。
2	模式顯示	顯示所選的模式名稱
3	導航	顯示可以移動到上一步的按鈕
4	選擇窗口	顯示詳細操作所需的輸出，時間和其他詳細信息



— 使用介面可能因版本而異








# 3

## 用戶界面

### 狀態圖示



您可以通過狀態指標中顯示的圖標檢查磁力瘦的狀態。

圖示	內容	
	顯示磁力瘦的內部溫度。 如果溫度太高，請在一段時間後再次操作。	
	溫度指示	
		
溫度	正常 (安全)	低位 (危險)

圖示	內容	
	標示水箱水位高度， 如果低位表示水不夠，請加水後，重啟主機再使用	
	水位	
		
水位	正常 (安全)	低位 (危險)

### 導航按鍵


觸摸導航中的按鍵以回到上一頁

圖標	內容
	返回鍵 觸按可回到上一頁。
	主頁鍵 觸按進入主屏幕 (選擇模式)。



# 4

## 如何操作

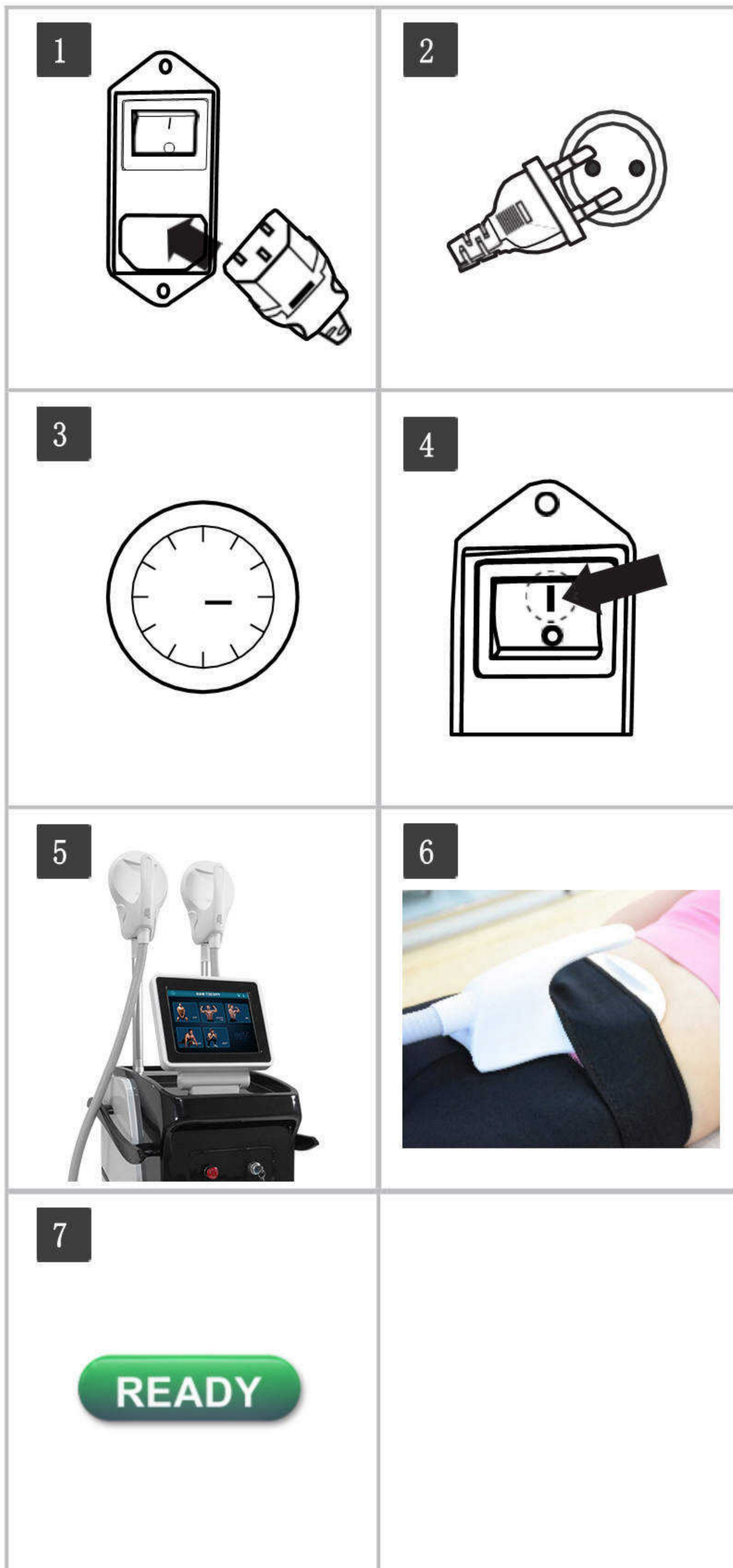

1. 將電源線連接到磁力瘦背後的插座。
2. 將電源線的插頭連接到插座。
3. 等待大約5至10秒。
4. 按電源鍵將其啟動。  
( I 圖示向內 )
5. 在屏幕上選擇所需的模式。
6. 使用固定帶將治療機頭牢固固定到指定位置，以防止其移動。
7. 然後觸按開始鍵進行操作。

模式選擇方法和細節詳見第5節  
和第6節。



- 使用前，機器需遠離電子設備，帶有磁鐵的物件和智能卡。




## 5

## 如何使用

## 選擇模式

磁力瘦在主屏幕上提供二種模式以切合用戶所需

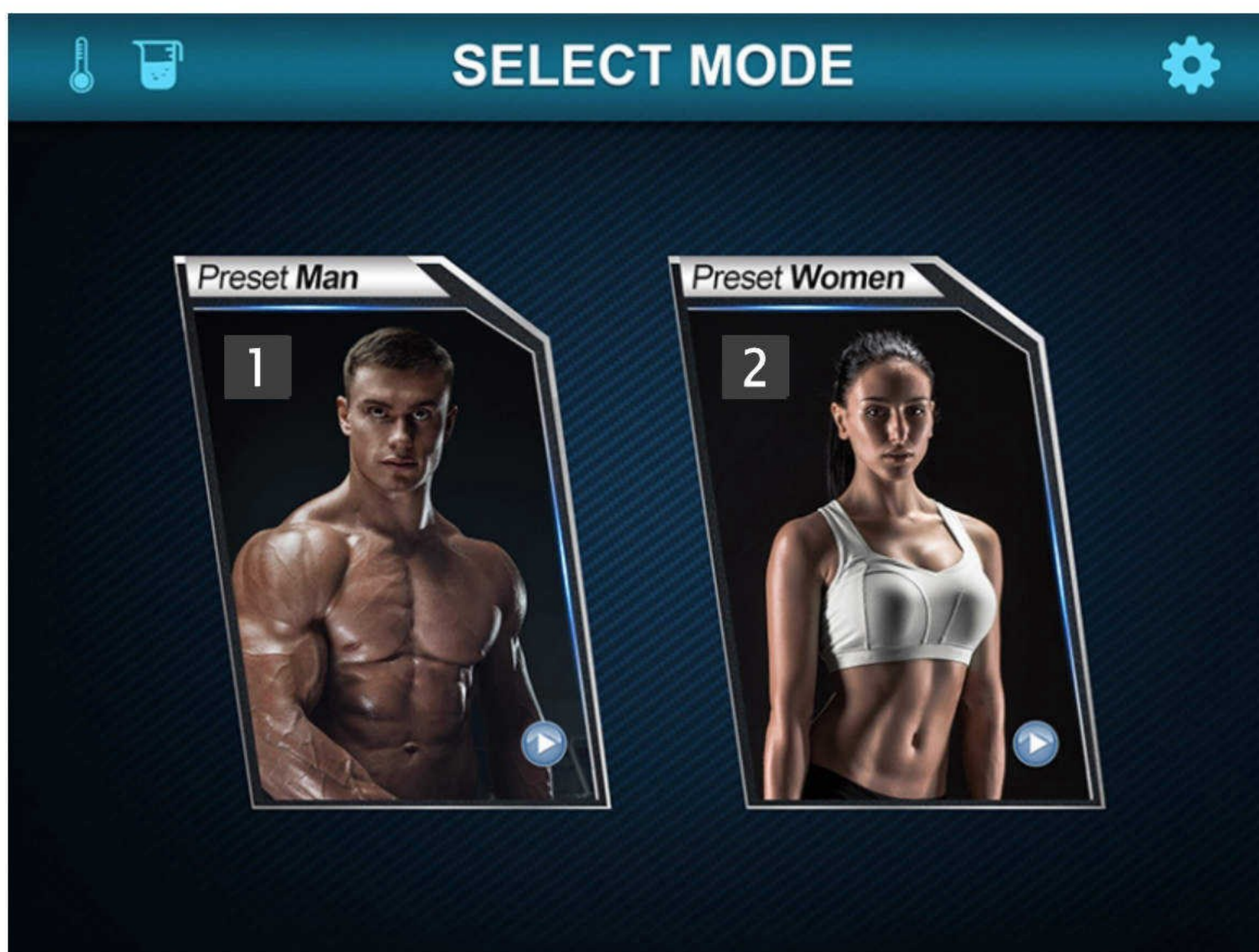

模式	號碼	選擇模式	介紹
預設	1	預設男仕 Preset Man	您可以為五個身體部位中的每一個部位選擇五個程序。
	2	預設女仕 Preset Woman	男女有相同的部位和程序選擇，但基於身體特徵有別，時間及輸出均會不同。



– 預設模式只適用於成年人。

未滿18歲，年齡超過70歲或身體不適人士，請勿使用。



## 5

## 如何使用

## 選擇部位

當您在主屏幕上觸按預設模式時，進入選擇部位屏幕，您可以在五個身體部位中選擇其中一個。



編號	身體部位	編號	身體部位
1	腹肌及人魚線 ABS	2	肩臂 Shoulder Arm
3	盆股肌肉 Gluts	4	大腿肌 Thighs
5	腿後肌 Hamstring		



- 請勿使用指定的身體部位以外的其他部位。
- 切勿在心臟或靠近心臟位置、頸動脈附近或手術後的位置使用。



## 5

## 如何使用

## 預設男仕 / 預設女仕模式

如果選擇了身體部位，請到預設男仕或預設女仕屏幕，您可以在當中設定適合的鍛鍊計劃、強度以及時間。



1	有氧減脂高強度間歇訓練模式 HIIT	鍛鍊肌肉同時減少身體脂肪
2	增肌訓練模式 Hypertrophy	增加肌肉生長
3	肌肉力量訓練模式 Strength	增加肌肉力量而不增加肌肉量
4	強化增肌減脂訓練模式 Combo 1	有氧減脂高強度間歇訓練模式 HIIT + 增肌訓練模式 Hypertrophy
5	強化增肌及肌力訓練模式 Combo 2	增肌訓練模式 Hypertrophy + 肌肉力量訓練模式 Strength
6	強度等級 Level	可以調整輸出為以下四個等級： 低，中，高，及極高
7	時間 Time	默認預設為30分鐘。您可以將其設置為最少10分鐘，最多60分鐘。
8	準備 Ready	觸按後進入開始屏幕



## 5 如何使用

### 預設男仕 / 預設女仕模式

觸按準備鍵進入下一個屏幕進行操作，此屏幕將顯示鍛鍊計劃的進度。



1	選定的部位和鍛鍊計劃	顯示選定的部位和所選的鍛鍊計劃
2	現行計劃	顯示當前正在進行的詳細計劃和時間
3	下一個計劃	顯示完成當前程序後的下一個計劃
4	強度等級	您可以調整輸出為以下四個程度： 低，中，高，和極高
5	時間	顯示整個計劃的剩餘時間
6	啟動工作	觸按開始，啟動主機工作
7	暫停工作	觸按暫停，停止工作



## 經過精心設計的計劃

磁力瘦的私人定制鍛鍊程式根據每個人的目的和身體能力提供各種選擇。使用者可以設定所有細節，如性別、身體部位、鍛鍊強度和計劃。磁力瘦的定制計劃能在每節中提供理想的強度和鍛鍊計劃。

## 結構計劃

磁力瘦的所有程式都是按照實際鍛鍊運動的感覺和效果而設。基本的30分鐘計劃包括一個2分鐘的拉伸模式，一個5分鐘的熱身模式，4 x 5分鐘主要鍛鍊模式和2分鐘冷卻模式。每組基本上都是階梯式的配置，理想地用於重量訓練，旨在提供適合每個人不同目的的頻率和強度的最佳效果。



- 詳細程式的默認時間為**30**分鐘。配置時間根據使用時間調整而有所變化。
- 使用此模式時，操控者應盡可能減少強度輸出，以允許使用者查看，然後再增加程序。



## 禁止事項

請保持電源插頭的金屬位置遠離多塵或潮濕的地方。  
清潔時，請使用抹布清潔劑。

- 請勿彎曲電源線，請勿在電源插頭上放置重物。
- 請把設備和電源插頭遠離加熱器或爐。
- 請勿用力拔出或用濕手觸碰電源插頭。
- **手柄漏液禁止使用。**

## 注意事項

- 請在使用後關閉電源。
- 添加冷水前，請先關閉電源。
- 請勿掉落治療機頭。



- 請詳細閱讀產品說明。
- 治療機頭發出的電磁場會損壞植入的心臟起搏器和人工耳蝸。



## 警告事項

- 為避免觸電，此設備只能連接到帶有接地線保護的電源。
- 切勿自行修理，拆卸或改裝此設備。
- 未經製造商授權，請勿改裝此設備。
- 如果修改了此設備，必須進行適當的檢查和測試以確保安全。
- 請持續安全地使用設備。
- 普通保修人員不能更換電源線。
- 在使用設備前，請先完全熟悉本手冊中所述的細則和說明。
- 請參考圖片和照片等輔助材料作深入理解。
- 請謹記代表危險、警告、注意及其他的標誌及符號。
- 請仔細閱讀本手冊並熟悉其內容，以防止受傷或因個人疏忽而造成的損害。
- 切勿對設備施加強烈撞擊。



## 當使用時

- 請檢查設備是否正常運作
- 當設備或使用者出現異常情況時，請立即停止設備的運作
- 電源故障時請拔出電源線
- 請勿在有易燃、爆炸性液體或氣體的地方使用
- 請保護電線遠離腐蝕性物質的損害
- 除指定人員外，請勿觸摸設備
- 不要自行重新組裝和重建設備
- 請勿在溫度和濕度較高的地方使用
- 請勿與其他裝置或設備一起使用
- 請勿在具有電子設備或儀器的地方使用
- 請按照手冊中的操作順序進行操作
- 需要醫生或治療師的指示和命令

## 以下情況不得使用

- 帶有起搏器的患者
- 孕婦或哺乳期婦女
- 患有心臟病的患者或心臟較弱的人
- 植入體內植入物的人
- 患有腦血管疾病（中風患者）的人
- 患有腦損傷或曾動腦部手術的人
- 頸動脈附近
- 使用可植入的醫療設備的人



## 7 規格

<b>功率</b>	電力需求	220 V50/60Hz
	耗電量	2.3KVA
<b>磁波</b>	輸出強度	0~7 Tesla
	刺激脈衝的形狀 Shape of stimulation pulse	雙相波
	脈衝	300 μs (微秒)
<b>尺寸</b>	產品尺寸 (長*寬*高)	45*60*145cm
	包裝尺寸 (長*寬*高)	55*70*105cm
	重量	65kg



根據地區或產品版本，可能會因版本而異



## 保修

- 自發貨日起一年內保修設備的瑕疵，不包括人為損壞。
- 公司將自行選擇維修或更換在保修期內證明有問題的部件，維修或更換將由公司或其批准的代理商執行。
- 公司只在以下情況考慮負責設備的安全性、可靠性和性能的影響：  
公司授權的維修人員負責進行的組裝部件、重新調整、修改或維修；  
在根據使用說明書下使用設備，並且使用符合相應國家要求的電力裝置；  
電源安裝需安全連接，包括任何潛在配件。
- 如果產品需要退回公司進行維修，公司不會支付運費。
- 消耗品（例如治療機頭）不在上述保修範圍之內。



- 切勿任意拆卸。  
任何拆卸，隨意維修或改裝所造成的故障均不在保修範圍內。